



BIOVOXEL
TECHNOLOGIES


Mandibular Anesthesia Model



POPIS PRODUKTU

Model obsahuje:

- Silikónové mäkké ďasno
- Kompletné zuboradie od 38 do 48 v DČ s reálnymi anatomicky a organicky tvarovanými korenmi
- Sánku

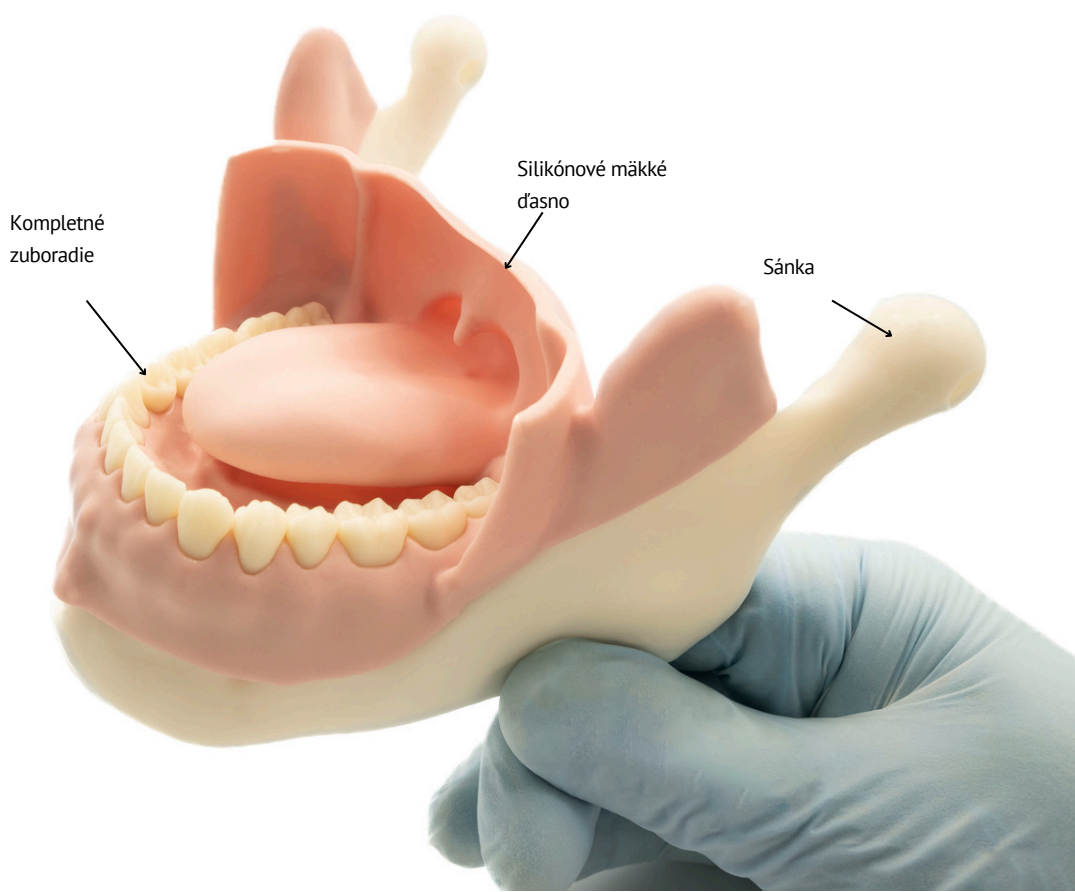

NÁVOD NA POUŽITIE

Model Vám umožňuje trénovať:

- Priamu a nepriamu mandibulárnu anestéziu

Po vpichu a prevedení manévru mandibulárnej anestézie si môžete skontrolovať polohu hrotu ihly z dorzálnej strany modelu.

- Infiltračnú anestézu
- Intraligamentálnu anestézu



Výmena ďasna

- 1/ Vyberte z modelu postupne všetky zuby ručne, alebo jemne kliešťami.
- 2/ Vyberte ďasno.
- 3/ Vložte nové ďasno na kostný alveol.
- 4/ Vložte naspäť zuby.

Poznámka: Ak sú zuby uvoľnené a nedržia, odporúčame ku koreňu pod zub vložiť malú guľičku lepiacej gummy napr. "PRITT Multi Fix Sticky Dots"

Náhradné diely

V prípade potreby objednania náhradných dielov, navštívte našu stránku www.biovoxel.tech, alebo nám napíšte na sales@biovoxel.tech.

Spätná väzba

V prípade akýchkoľvek otázok alebo spätnej väzby na vylepšenie modelu sa nám neváhajte ozvať na info@biovoxel.tech alebo na náš whatsapp.

Prajeme veľa kvalitného tréningu!

Biovoxel Technologies



www.biovoxel.tech