



BIOVOXEL
TECHNOLOGIES

BIOVOXEL ENDOPAN BASIC




POPIS PRODUKTU

EndoPan Basic je praktický a jednoduchý stolový držák pre fixáciu akéhokoľvek tréningového zubu.

Držiak obsahuje:

- ODNÍMATELNÉ GUMENÉ PÚZDRO
- NÁDOBU PRE VÝPLACHOVÝ ROZTOK
- FIXAČNÉ SKRUTKY
- STOLOVÝ ZVERÁK

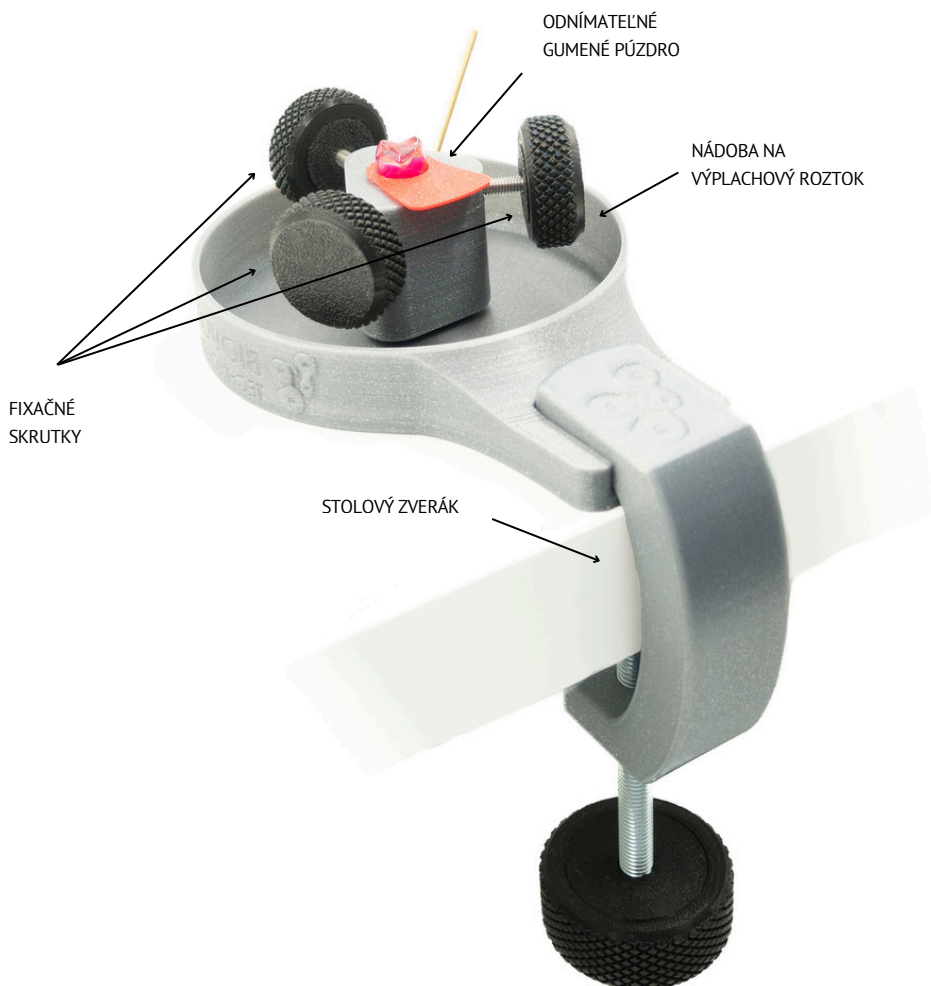

NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým ako začnete

- Pripevnite stolový zverák k stolu.
- Pevne ho upevnite, aby ste zabránili nestabilite. Stolový zverák umožňuje umiestniť EndoPan na stolové dosky s hrúbkou 0 - 4,5 cm.

Vloženie zubu

1. Zub vložte do červeného gumeného púzdra
2. Zub upevnite tak, že ho budete držať a otáčať skrutkami v smere hodinových ručičiek.




Dajte pozor: Ak príliš utiahnete skrutky, môže dôjsť k zlomeniu zuba.

Apex lokátor

Ak chcete používať apex lokátor spolu s EndoPan Basic, pripevnite jeho kábel ku mosadznému drôtu.

Gumené puzdro je potrebné naplniť vodivou tekutinou alebo gélom (napr. slanou vodou).

Poznámka: Pri práci s Biovoxel Endotooth začne apexlokátor odčítavať hodnoty až po vyčistení celého kanálíka od umelej zubnej drene a jeho dobrej irigácii.

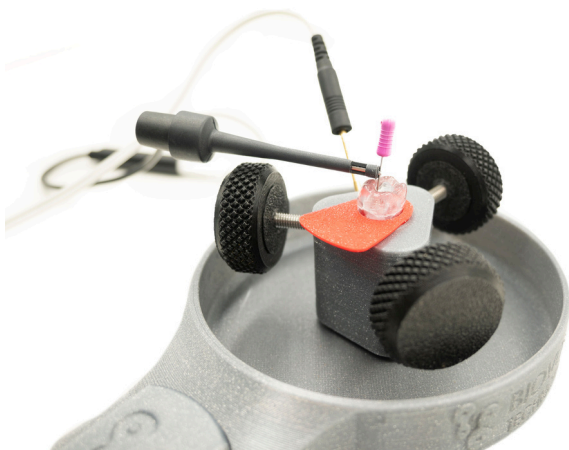

Dôležité upozornenie

Nečistite ani nesterilizujte produkt v umývačke riadu. Vystavenie vysokým teplotám alebo silným čistiacim prostriedkom môže spôsobiť poškodenie alebo deformáciu modelu.

Náhradné diely

Ak si potrebujete objednať náhradné diely alebo iné produkty, kontaktujte nás na adrese sales@biovoxel.tech alebo navštívte našu webovú stránku www.biovoxel.tech.

Spätná väzba

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k ďalšiemu zlepšeniu modelu, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@biovoxel.tech alebo cez whatsapp.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš držiak.
Prajeme vám veľa kvalitných tréningov!

Biovoxel Technologies



BIOVOXEL
TECHNOLOGIES

www.biovoxel.tech