




**BIOVOXEL
TECHNOLOGIES**

BIOVOXEL ENDOPAN BASIC

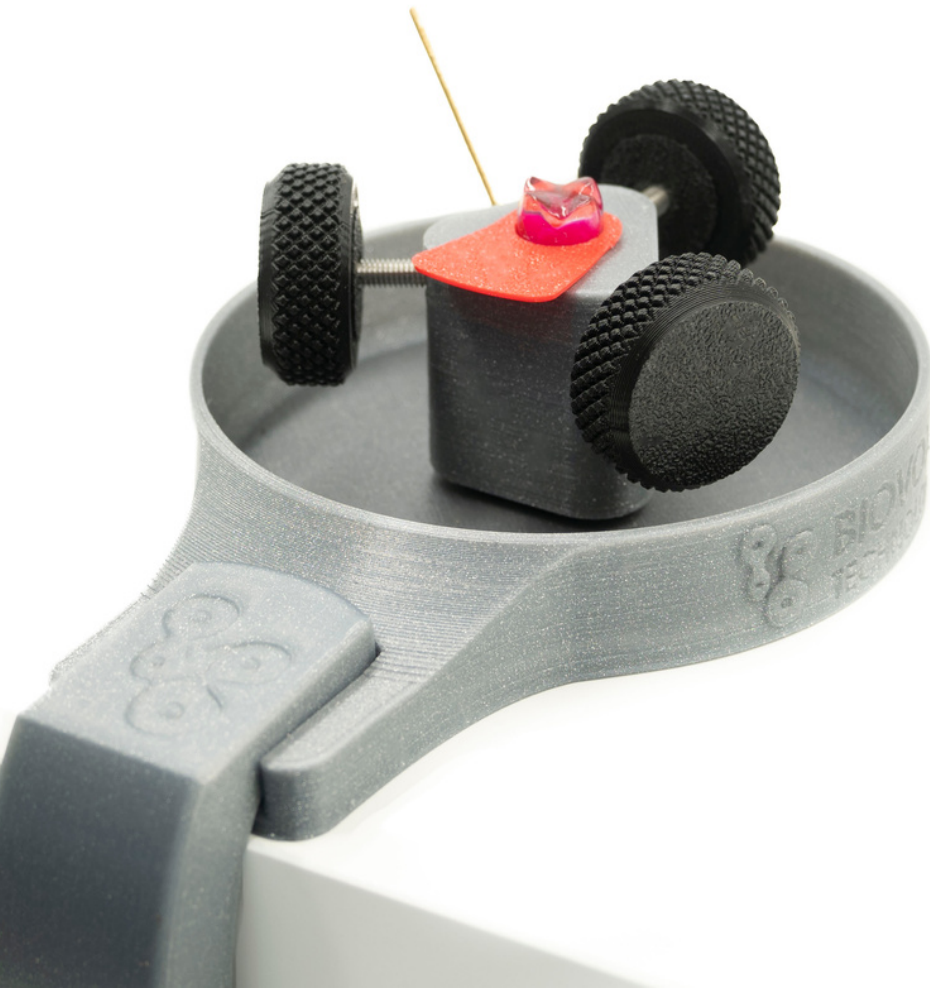


POPIS PRODUKTU

EndoPan Basic je praktický a jednoduchý stolový držák pre fixáciu akéhokoľvek tréningového zubu.

Držiak obsahuje:

- ODNÍMATELNÉ GUMENÉ PÚZDRO
- NÁDOBU PRE VÝPLACHOVÝ ROZTOK
- FIXAČNÉ SKRUTKY
- STOLOVÝ ZVERÁK

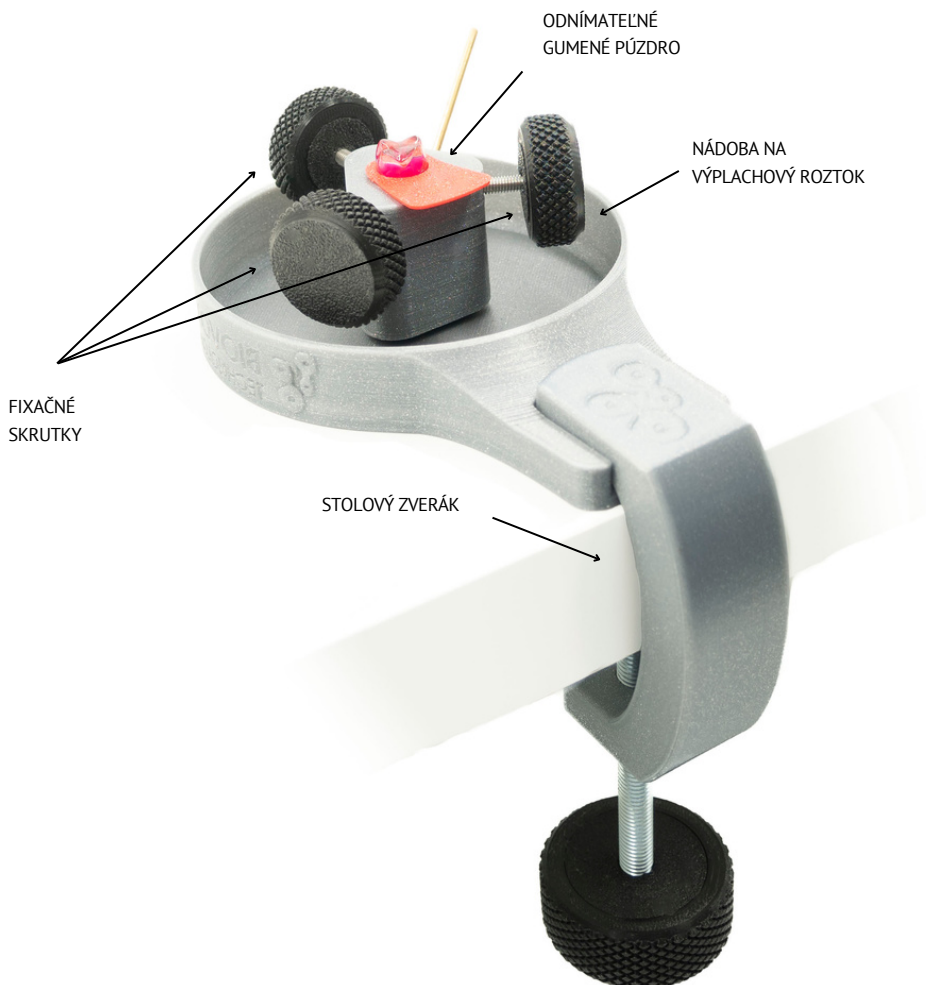

NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým ako začnete

- Pripevnite stolový zverák k stolu.
- Pevne ho upevnite, aby ste zabránili nestabilite. Stolový zverák umožňuje umiestniť EndoPan na stolové dosky s hrúbkou 0 - 4,5 cm.

Vloženie zubu

1. Zub vložte do červeného gumeného púzdra
2. Zub upevnite tak, že ho budete držať a otáčať skrutkami v smere hodinových ručičiek.



Dajte pozor: Ak príliš utiahnete skrutky, môže dôjsť k zlomeniu zuba.

Apex lokátor

Ak chcete používať apex lokátor spolu s EndoPan Basic, pripevnite jeho kábel ku mosadznému drôtu.

Gumené puzdro je potrebné naplniť vodivou tekutinou alebo gélom (napr. slanou vodou).

Poznámka: Pri práci s Biovoxel Endotooth začne apexlokátor odčítavať hodnoty až po vyčistení celého kanálika od umelej zubnej drene a jeho dobrej irigácii.



Náhradné diely

Ak si potrebujete objednať náhradné diely alebo iné produkty, kontaktujte nás na adrese sales@biovoxel.tech alebo navštívte našu webovú stránku www.biovoxel.tech.

Spätná väzba

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k ďalšiemu zlepšeniu modelu, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@biovoxel.tech alebo cez whatsapp.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš držiak.
Prajeme vám veľa kvalitných tréningov!

Biovoxel Technologies Team

