




BIOVOXEL
TECHNOLOGIES

BIOVOXEL ENDOPAN PRO

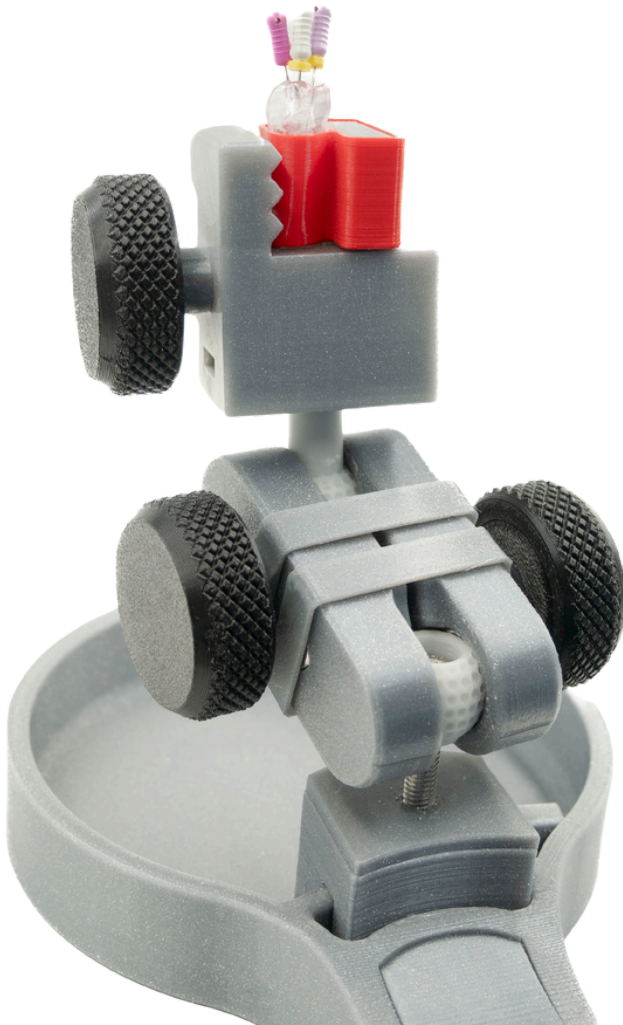

POPIS PRODUKTU

EndoPan PRO je praktický stolový držiak, ktorý umožňuje fixovať zub v rôznych uhloch.

Môžete pracovať v priamom pohľade, nepriamom pohľade alebo umiestniť zub do ľubovoľného potrebného uhla.


Držiak obsahuje:

- ODNÍMATELNÉ GUMENÉ PÚZDRO
- ODNÍMATELNÚ HLAVU
- DVOJITÝ KLÍB
- FIXČNÉ SKRUTKY
- NÁDOBU NA VÝPLACHOVÝ ROZTOK
- POHYBLIVÝ KLÍB
- STOLOVÝ ZVERÁK

NÁVOD NA POUŽITIE

Predtým ako začnete


- Pripevnite stolový zverák k stolu.
- Pevne ho upevnite, aby ste zabránili nestabilite. Stolový zverák umožňuje umiestniť zariadenie EndoPan PRO na stolové dosky s hrúbkou 0 - 7 cm.
- Dotiahnite obe skrutky v dvojitom klíbe.
- Pritiahnite hlavu otáčaním v smere hodinových ručičiek (keď sú skrutky s dvojitým klíbm uvoľnené, hlavu nemožno bezpečne upevniť).
- Hlava je odnímateľná a možno ju vymeniť za Biovoxel Typodont čelusť.

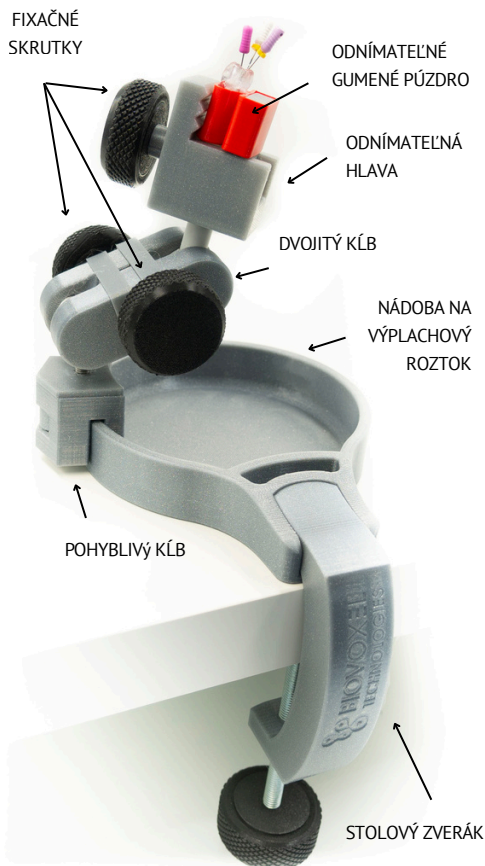

Nastavenie držiaku pre tréning

EndoPan PRO si môžete nastaviť podľa svojich preferencií.

1. Uvoľnite skrutky na dvojitom kĺbe (proti smeru hodinových ručičiek).
2. Držte hlavu v požadovanej polohe.
3. Utiahnite skrutky na dvojitom kĺbe v smere hodinových ručičiek a zároveň držte hlavu.

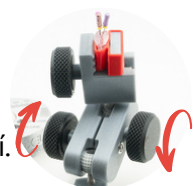

1.



2.

Vloženie zubu

1. Zub vložte do červeného gumeného púzdra.
2. Zub upevnite tak, že ho budete držať a otáčať skrutkou v smere hodinových ručičiek.



Dajte pozor: Ak príliš utiahnete hornú skrutku, ktorá fixuje zub, môže dôjsť k zlomeniu zuba.

Apex lokátor

Ak chcete používať apex lokátor spolu s EndoPan PRO, vložte kovový háčik do gumeného púzdra a pripevnite svorku na pilník (alebo pracujte priamo s endomotorom). Gumené puzdro je potrebné naplniť vodivou tekutinou alebo gélom (napr. slanou vodou).

Poznámka: Pri práci s Biovoxel Endotooth začne apexlokátor odčítavať hodnoty až po vyčistení celého kanálika od umelej zubnej drene a jeho dobrej irigácii.




Použitie Biovoxel Typodont čeluste

1. Uistite sa, že sú skrutky dvojitého kĺbu dobre tiahnuté.
2. Odskrutkujte hlavu svorky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
3. Vyberte hlavu a nahradte ju typodontovou čelusťou.
4. Skrutkujte čelusť v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne na svojom mieste.



1.

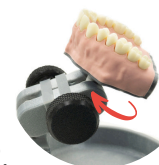

2.

Dôležité upozornenie

Nečistite ani nesterilizujte produkt v umývačke riadu. Vystavenie vysokým teplotám alebo silným čistiacim prostriedkom môže spôsobiť poškodenie alebo deformáciu modelu.

Náhradné diely

Ak si potrebujete objednať náhradné diely alebo iné produkty, kontaktujte nás na adrese sales@biovoxel.tech alebo navštívte našu webovú stránku www.biovoxel.tech.



Spätná väzba

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k ďalšiemu zlepšeniu modelu, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@biovoxel.tech alebo cez whatsapp.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš držiak.
Prajeme vám veľa kvalitných tréningov!



Tím Biovoxel Technologies



www.biovoxel.tech

