

MONOMATERIÁLNE ZUBY (KaVo Analog)

POPIS PRODUKTU

- Jednoduché jednomateriálové zuby
- Tvrdosť dentínu
- Odtieň farby zubov



NÁVOD NA POUŽITIE

Pri vkladaní zubov do čelustí zatlačte silnejšie vo vertikálnom smere. Pri vkladaní dbajte na správnu orientáciu zárezu na tyčke zubu a tlačte ho dovnútra, kým nezapadne na miesto. Zárez je orientovaný v smere ku čiernej línii na obrázku.



Veľmi užitočné je držať model pri nasadzovaní zubov v obrátenej polohe, kedy sa dá dobre kontrolovať vsadenie zubu. Môžete si tiež pomôcť zatlačením zuba o tvrdý predmet (stól).

ODPORÚČANIE

Pri preparácii je vhodné mať odsávanie vzduchu/ vody, resp. chladenie vodou tak ako pri preparácii akýchkoľvek iných zubov kvôli odvodu preparačnej drte.

Pri preparácii odporúčame používať rúško, poprípade ochranné okuliare.

Prajeme veľa úspešne nacvičených zákrokov !

Dodatočné repliky je možné objednať na stránke www.biovoxel.tech

