

BIOVOXEL TYPODONT ČELUŠŤ



Gratulujeme

k zakúpeniu Biovoxel čelustí na dentálny tréning!

Vaším nákupom ste sa stali majiteľom jedných z najpokročilejších modelov na tento účel a zároveň podporujete inovácie vznikajúce na Slovensku.

Aby Vám model dobre slúžil, prečítajte si prosím tento návod.

POPIS ČELUSTE

- Modely obsahujú kompletne zuboradie
Horná čelusť: zuby 18–28
Dolná čelusť: zuby 38–48
- Zuby majú reálne anatomické a organicky tvarované korene.
- Modely obsahujú silikónové mäkké ďasno.
- Modely dostávajú so zubami zafixovanými – tzn. utiahnutými skrutkami.



NÁVOD NA POUŽITIE

Uvoľňovanie / vytáhovanie zubov

Zuby sa uvoľňujú vnútornými mini skrutkami, ktoré sú viditeľné pri pohľade zo zadnej strany modelu.

- Na uvoľnenie použite priložený 1.5mm imbusový kľúč.
- Pri uvoľnení stačí skrutku 3-4 krát otočiť smerom doľava – nie je potrebné ani vhodné ju vyskrutkovať celú.
- Ručne vyberte zub.

Vkladanie zubov

1. krok: Vloženie zubu

- Vložte zub do alveoly.
- Zatlačte zub pevne v okluzálnom smere, až kým nebude úplne usadený.
- Môžete použiť prst alebo pevnú podložku (napr. jemným pritlačením o stôl alebo pevný nástroj).



2.krok: Upevnenie zuba pomocou skrutky

- Po úplnom usadení zuba vezmite imbusový kľúč 1,5 mm.
- Vložte imbusový kľúč a otáčajte ho doprava (v smere hodinových ručičiek), čím zaskrutkujete vnútornú skrutku.

Krok 3: Konečné dotiahnutie

⚠ **Hneď ako pocítite, že sa skrutka dotkla zuba, prestaňte dotáňovať.**

- Nepoužívajte nadmernú silu.
- Zub by mal byť pevný, stabilný a nemá by sa pohybovať.

⚠ **Dôležité upozornenie – použitie s EndoTooth zubom**



- EndoTooth **utáňujete veľmi jemne**. Skrutku otáčajte len dovtedy, **kým nepocítite prvý mierny odpor**.
- V tom momente: Skontrolujte zub rukou. Ak je zub stabilný, ďalej neutáňujte. Nadmerné utiahnutie môže spôsobiť zlomenie koreňa.

Výmena ďasna

1/ Vyberte z modelu všetky zuby (postupujte podľa vyššie uvedených pokynov "uvoľnenie zubov").

2/ Vyberte ďasno.

3/ Vložte nové ďasno na kostný alveol.

4/ Vložte zuby.



Vloženie do krabičky

Pred vložením čelustí typodontu do úložnej krabičky sa uistite, že sú správne orientované. Čeluste musia byť vložené tak, aby **predné zuby smerovali nahor**.

Táto orientácia zaručuje, že čeluste nebudú poškodené vnútri krabičky a poskytuje najstabilnejšie uloženie počas skladovania.

Nesprávne vloženie môže viesť k nepotrebnému opotrebeniu alebo nestabilite čelustí typodontu v krabičke.



Riešenie problémov

Pri prílišnom utiahnutí alebo pri nedostatočnom dosadení zubu je možné zlomenie koreňa v mieste uchytenia. V takom prípade je možné ho vymeniť (zlomená špička sa musí extrahovať, je na to vhodný ostrý nástroj, napr. aj kyreta).

Náhradné diely

V prípade potreby objednania náhradných dielov, navštívte našu stránku www.biovoxel.tech, alebo nám napíšte na sales@biovoxel.tech.



Spätná väzba

V prípade akýchkoľvek otázok alebo spätnej väzby na vylepšenie modelu sa nám neváhajte ozvať na info@biovoxel.tech alebo na náš whatsapp.



Prajeme veľa kvalitného tréningu!
Tím Biovoxel Technologies

