



**BIOVOXEL
TECHNOLOGIES**

BIOVOXEL TYPODONT ČELUŠŤ



Gratulujeme

k zakúpeniu Biovoxel čelustí na dentálny tréning!

Vaším nákupom ste sa stali majiteľom jedných z najpokročilejších modelov na tento účel a zároveň podporujete inovácie vznikajúce na Slovensku.

Aby Vám model dobre slúžil, prečítajte si prosím tento návod.

POPIS ČELUSTE

- Modely obsahujú kompletne zuboradie od 18 po 28 v HČ a od 38 do 48 v DČ.
- Zuby majú reálne anatomické a organicky tvarované korene.
- Modely obsahujú silikónové mäkké d'asno.
- Modely dostávajúte so zubami zafixovanými – tzn. utiahnutými skrutkami.

NÁVOD NA POUŽITIE

Uvoľňovanie / vyťahovaie zubov

Zuby sa uvoľňujú vnútornými mini skrutkami, ktoré sú viditeľné pri pohľade zo zadnej strany modelu.

1/ Na uvoľnenie použite priložený 1.5mm imbusový kľúč.

2/ Pri uvoľnení stačí skrutku 3-4 krát otočiť smerom doľava – nieje potrebné ani vhodné ju vyskrutkovať celú.

3/ Ručne vyberte zub.



Vkladanie zubov

1/ Pri fixovaní zubu je potrebné ho vtlačať do alveolu dostatočne silno okluzálne (prstom alebo o tvrdú pomôcku – napr stôl).

2/ V pozícii keď je zub usadený v alveole je potrebné vnútornú skrutku v jeho mieste zatočiť doprava a fixovať ho.

Nie je potrebné príliš skrutku ťahovať, stačí jemný protitlak (Keď cítite že skrutka narazila o zub, už netočiť nasilu výrazne ďalej - len tak aby bol zub pevný a nehýbal sa).

Výmena ďasna

1/ Vyberte z modelu všetky zuby () Remove all the teeth from the model (postupujte podľa vyššie uvedených pokynov "uvoľnenie zubov").

2/ Vyberte ďasno.

3/ Vložte nové ďasno na kostný alveol.

4/ Vložte zuby.

Riešenie problémov

Pri prílišnom utiahnutí alebo pri nedostatočnom dosadení zubu je možné zlomenie koreňa v mieste uchytenia. V takom prípade je možné ho vymeniť (zlomená špička sa musí extrahovať, je na to vhodný ostrý nástroj, napr. aj kyreta).

Náhradné diely

V prípade potreby objednania náhradných dielov, navštívte našu stránku www.biovoxel.tech, alebo nám napíšte na sales@biovoxel.tech.



biovoxel.tech



Spätná väzba

V prípade akýchkoľvek otázok alebo spätnej väzby na vylepšenie modelu sa nám neváhajte ozvať na info@biovoxel.tech alebo na náš whatsapp.



Prajeme veľa kvalitného tréningu!

Biovoxel Technologies

www.biovoxel.tech